



Комплект светильник Альфа ФДБ7-9-001 с УФ-лампой Вуда (Лампа Вуда)

СВЕТИЛЬНИК АЛЬФА ФДБ 7-9-001 МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С УФ-ЛАМПАМИ ВУДА, (РАБОЧАЯ ДЛИНА ВОЛНЫ КОТОРОЙ 356 НМ) В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОСВЕТИТЕЛЯ И С УФ-ЛАМПОЙ PHILIPS (UV-B NARROWBAND PL-L/PL-S) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА.

По свечению коже под воздействием УФ-лампы можно определить её состояние. С помощью лампы можно обнаружить дерматоз, грибковые заболевания, стригущий лишай, кандидоз, волчанку и многие другие заболевания кожи.

Основные варианты свечений:

- Разноцветный лишай – тусклое жёлтое свечение.
- Эритразма – кораллово-красное свечение.
- Инфекция Pseudomonas – зелёное свечение.
- Грибковая инфекция – зеленоватое свечение.
- Нарушение пигментации в коже – коричневое свечение.
- Наличие воспалительного процесса – белое свечение.
- Чувствительная кожа – фиолетовое свечение.
- Сухая кожа – бирюзовое свечение.
- Здоровая, неинфицированная кожа без воспалений и поражений – светло-синее свечение.

13 Вт	220 В	50 Гц	КЛЛ G23 9Вт	
-------	-------	-------	-------------------	--


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	дерматология, косметология, ветеринария, индивидуальные подсобные и фермерские хозяйства, анализ качества продуктов питания и семенного посадочного материала, проверка денежных купюр на наличие люминесцирующих меток и красок			
ЦВЕТ МОДЕЛИ	черный			
0,85 кг/ вес изделия в упаковке	352x100x75 мм/ индивидуал. упаковка	12шт/ упаков.	10,3 кг/ вес брутто	400x392x245 мм/ групповая упаковка

Правила использования осветителя:

- За 3 суток до проведения осмотра надо отменить применение всех мазей, кремов на своей коже или коже домашнего питомца.
- Непосредственно перед обследованием не дезинфицируйте и не мойте пораженный участок.
- Весь процесс необходимо проводить в полной темноте.
- Перед использованием лампы обязательно наденьте специальные очки или тканевую повязку на глаза.
- Лампа должна вначале прогреться в течение минуты.
- Освещается поверхность кожи с расстояния 15-20 см.
- Осмотр подлежат кожные покровы, ногти, а также шерсть и когти домашних питомцев.
- Если вы проводите диагностику животного, имейте в виду, что черная шерсть может не давать свечения, даже при наличии заболеваний.
- Не используйте при наличии механических повреждений на коже.
- Не используйте дольше 2 минут единовременно.

Этот метод является первичным видом диагностики. Помните, что полная картина заболевания станет точной и ясной только после посещения врача или ветеринара и прохождения необходимых анализов.

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

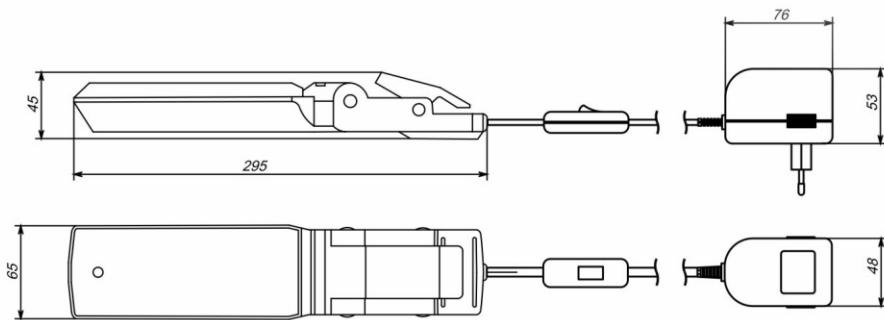

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛАМПЫ:

1. Ультрафиолетовая лампа Foton Lighting ESL S-2P BLB мощностью 9 Ватт с цоколем G23.
Выбор УФ-лампы зависит от вида работы, для которой она требуется.
Например, в косметологии или в аппаратах для проверки валюты, где необходимо сэкономить пространство, удобно использовать компактные УФ-лампы с двойной колбой с цоколем G23 длиной 165 мм (9Вт).
2. Philips (UV-B Narrowband PL-L/PL-S) - лучшая в своем классе эффективность лечения достигается за счет очень узкого диапазона излучения: от 305 до 315 нм с пиком излучения на 311 нм. Это один из самых эффективных диапазонов для лечения псориаза.
Для фототерапии таких болезней, как псориаз, парапсориаз, витилиго, атопический дерматит и грибовидный микоз.